

# KÄYTTÖOHJE: GEELIKANTATYNYT

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

## TEKNISET TIEDOT

- **Koko:** Soveltuu kenkiin välillä 40–46.
- **Materiaali:** Pehmeä ja joustava PU-geeli (polyuretaani).
- **Kiinnitys:** Itsekiinnittyvä alapinta.
- **Mitat:** 1,7 x 11,2 x 6,5 cm.
- **Paino:** 0,078 kg.
- **Pakkaus sisältää:** Pari (2 kpl) geelitukia.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Vähentää väsymystä ja kipua:** Geelipehmusteet mukautuvat jalkaterän muotoon ja jakavat kehon painon tasaisemmin kantapäälle. Tämä vähentää merkittävästi jalkojen iltaista särkyä ja ehkäisee kovettumien syntymistä.
- **Erinomainen vaimennus:** Tuet vaimentavat tehokkaasti kävelystä aiheutuvia iskuja ja mikrotärinää. Tämä keventää kantapään keskiosaan kohdistuvaa painetta ja vähentää luupiikin (kantapiikki) riskiä.
- **Erikoisjoustava rakenne:** Pehmeästä PU-materiaalista valmistettujen tukien sininen alue on erityisen joustava, mikä maksimoi iskunvaimennuksen juuri siellä, missä paine on suurin.
- **Pysyy paikallaan:** Tukien alapinta on varustettu liimapinnalla, joka pitää ne tukevasti paikallaan kengässä. Ne eivät luista kävellessä tai kenkiä riisuttaessa.
- **Huomaamaton mukavuus:** Ohut mutta tehokas muotoilu mahdollistaa käytön useimmissa jalkineissa ilman, että kenkä tuntuu ahtaalta.

### Vinkki:

*Jos kenkäsi tuntuvat hieman väljiltä, nämä kantapääpalat auttavat samalla täyttämään ylimääräistä tilaa ja estävät kantapäätä nousemasta ylös kengästä kävellessä!*

## ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

- **Pinnan valmistelu:** Varmista ennen asennusta, että kengän sisäpohja on puhdas pölystä ja liasta. Tämä takaa parhaan mahdollisen tartunnan.
- **Kiinnittäminen:** Poista suojakalvo geelituen alapinnasta. Aseta tuki tukevasti kengän kantapään kohdalle ja paina se napakasti paikoilleen.
- **Käyttöönotto:** Voit käyttää kenkiä välittömästi asennuksen jälkeen. Jos tunnet epämukavuutta, tarkista tuen asento ja säädä sitä tarvittaessa.

### Vinkki:

*Jos siirät tuet toisiin kenkiin ja liimapinta likaantuu, voit pyyhkiä alapinnan kevyesti kostealla liinalla ja antaa sen kuivua – tämä palauttaa osan tartuntakyvystä.*

## TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Puhdistus:** Pyyhi tuet säännöllisesti käsin nihkeällä liinalla. Vältä upottamista veteen tai voimakkaiden pesuaineiden käyttöä.
- **Säilytys:** Säilytä tuet kuivassa paikassa poissa suorien lämmönlähteiden lähetyviltä muodonmuutosten välttämiseksi.
- **Käytön lopettaminen:** Jos tunnet jatkuvaa kipua tai epämukavuutta, lopeta tuotteiden käyttö ja ota yhteys asiantuntijaan.
- **Rajoitukset:** Tuote on tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön. Se ei välttämättä sovellu erikoisturvajalkineisiin tai vaativaan urheilukäyttöön, joka vaatii poikkeuksellista kestävyyttä.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu polyuretaanista (PU).
- Elinkaarensa päähän tullut tuote hävitetään sekajätteenä.