

# KÄYTTÖOHJE: LÄÄKEANNOSTELIJA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

## TEKNISET TIEDOT

- Väri: Musta
- Materiaali: PP (polypropeeni)

## OMINAISUUDET

Lääkejärjestelijä on käytännöllinen työkalu lääkkeiden säilyttämiseen ja järjestämiseen seitsemän päivän ajaksi. Järjestäjässä on seitsemän erillistä lokeroa, jotka on merkitty viikonpäivillä.

- MON Maanantai
- TUE Tiistai
- WED Keskiviikko
- THU Torstai
- FRI Perjantai
- SAT Lauantai
- SUN Sunnuntai

Jokainen päivälokero on jaettu kolmeen osioon: aamu, keskipäivä ja ilta. Tuotteessa on turvalukitus, joka auttaa suojaamaan lääkkeitä tahattomalta läikkymiseltä.

## TURVALLINEN KÄYTTÖ

Säilytys: Pidä järjestäjä aina poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Pienetkin määrät tiettyjä lääkkeitä voivat olla heille hengenvaarallisia.

- Täyttäminen: Täytä järjestäjä viikon alussa välttyäksesi sekaannuksilta. Varmista ennen täyttämistä, että lääkkeet ovat voimassa.

- Lääkkeiden laatu: Säilytä järjestäjä kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.
- Erityisohjeet: Kaikkia lääkkeitä ei saa poistaa alkuperäispakkauksestaan tai jakaa osiin etukäteen. Varmista lääkäriltäsi tai apteekista, mitkä lääkkeet soveltuvat säilytettäväksi tässä järjestäjässä.
- Kunto: Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

Säännöllinen puhdistus edistää hygieniaa ja hoidon turvallisuutta:

- Poista kaikki lääkkeet järjestäjästä ennen puhdistusta.
- Pese järjestäjä käsin miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Voit käyttää pehmeää harjaa jäämien poistamiseen.
- Huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki pesuainejäämät.
- Kuivaa järjestäjä taputtelemalla se pyyhkeellä tai anna sen kuivua itseksensä. Varmista, että tuote on täysin kuiva ennen uudelleentäyttöä.