


KORVAHUUHTELULAITE

KORVIEN TEHOKKAASEEN PUHDISTUKSEEN

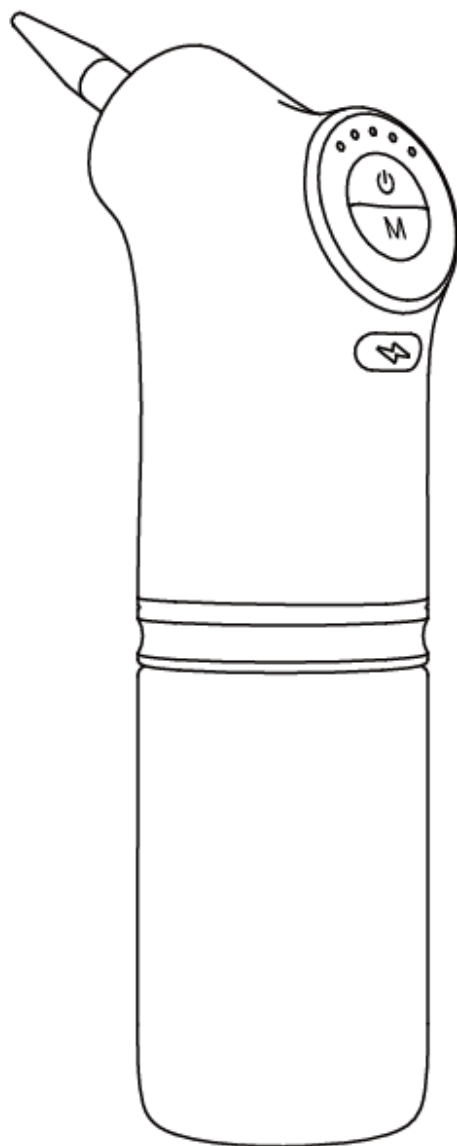

E30

KÄYTTÖOHJE

TURVALLISUUSOHJEET JA LÄÄKETIETEELLISET VAROITUKSET

- **Terveydelliset esteet:** Älä käytä laitetta, jos sinulla on korvatulehdus, korvavamma, tärykalvon reikä tai jos korvastasi vuotaa verta. Käänny lääkärin puoleen, jos olet epävarma terveydentilastasi.
- **Kivun tunne:** Paineen tunne korvassa käytön aikana on normaalia. Lopeta käyttö kuitenkin välittömästi, jos tunnet kipua, ja ota yhteys lääkäriin ammattitaitoisen avun saamiseksi.
- **Valvonta:** Lapset ja toimintarajoitteiset henkilöt tarvitsevat aina aikuisen tai huoltajan valvontaa laitteen käytössä. Tuote ei ole lelu, ja se on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.

Laitteen käsittely, huolto ja muutokset

- **Vedenkestävyys:** Laite ei ole kokonaan vedenpitävä. Älä puhdistu koko laitetta vedellä äläkä upota sitä nesteeseen.
- **Käyttöasento:** Älä käännä laitetta ylösalaisin käytön aikana. Muuten vesi voi päästä laitteen sisään ja vaurioittaa sen elektroniikkaa.
- **Muutokset ja purkaminen:** Älä muuta tai muokkaa tuotetta millään tavalla. Älä myöskään pura laitetta itse, sillä omavaltaisesta purkamisesta voi seurata tuotteen vaurioituminen tai vakavia henkilövahinkoja.
- **Akku ja lataus:** Laite sisältää akun. Pidä se etäällä avotulesta sekä kosteudesta ja suojaa laite korkeilta lämpötiloilta, sillä ylikuumeneminen voi aiheuttaa akun räjähtämisen. Varmista aina lataukseen sopiva DC 5 V -virtalähde.
- **Säilytys:** Säilytä laitetta kuivassa paikassa, erityisesti pitkien käyttötaukojen aikana.


Nesteen lämpötila

- **Kädenlämmin vesi:** Älä käytä kehon lämpötilaa kylmempää nestettä, sillä kylmä vesi korvassa voi aiheuttaa voimakasta huimausta.
- **Suositus:** Suositeltu veden lämpötila on **37 °C (± 2 °C)**.

Kierrätystiedot



Älä hävitä laitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kun poistat laitteen käytöstä, se on kierrätettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Koska tuote sisältää akkuelektroniikkaa, toimita se paikalliseen sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.

LAITTEEN JA MERKKIVALOJEN KUVAUKSET

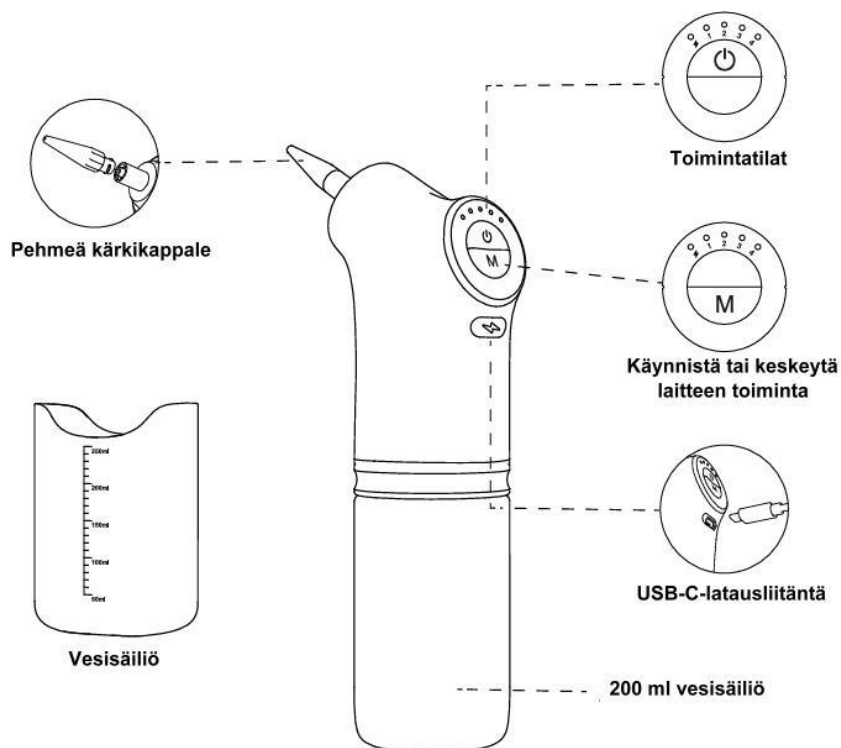

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

- **Käynnistäminen:** Paina virtapainiketta pohjassa 1–2 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
- **Sammuttaminen:** Paina virtapainiketta pohjassa 1–2 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo sammuu.
- **Suihkutuksen kytkin:** Lyhyt painallus käynnistää tai keskeyttää vesisuihkun.
- **Energiansäästö:** Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. Virta katkeaa itsestään 10 minuutin kuluttua, jos laitetta ei käytetä.

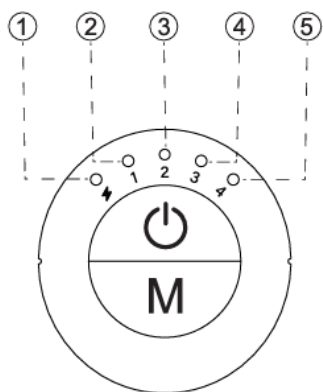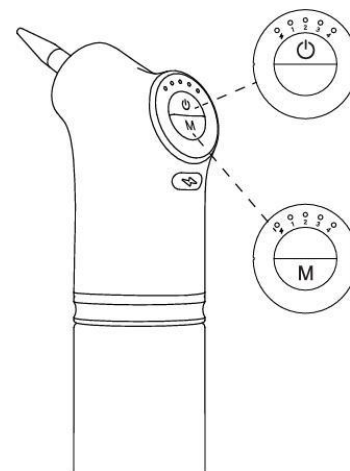

① Akun ilmaisin

- **Vilkkuva punainen valo:** Akun varaus on alhainen.
- **Jatkuva punainen valo:** Akku latautuu.
- **Sininen valo:** Akku on ladattu täyteen.

② Normaali tila

③ Hellävarainen tila

④ Sykkivä tila

⑤ Tehokas tila

TOIMINTATILAT JA KÄYTTÖVAIHEET

Toimintatilat

Laite tarjoaa neljä eri toimintatilaa (painealue 7–24,5 PSI), joista voit valita itsellesi sopivimman:

- **Normaali tila:** Kohtuullinen vedenpaine, joka sopii useimmille käyttäjille peruspuhdistukseen.
- **Hellävarainen tila:** Kevyt ja mieto vedenpaine, joka sopii herkille korville tai ensimmäisiin käyttökertoihin.
- **Sykkivä tila:** Vuorotteleva voimakas ja mieto vedenvirtaus, joka hieroo ja irrottaa vahaa tehokkaasti.
- **Tehokas tila:** Voimakas vedenpaine, joka poistaa kaikkein kovimman ja sitkeimmän korvavahan.

Käyttövaiheet

1. Täytä vesisäiliö kädenlämpöisellä vedellä (suositus 37 °C ± 2 °C).
2. Aseta kertakäyttöinen korvahuuhtelukärki tiukasti paikalleen.
3. Aseta mukana tuleva valumisastia huolellisesti huuhdeltavan korvan alapuolelle vettä keräämään.
4. Käynnistä laite ja liikuta kärkeä korvakäytävässä sujuvasti pyörivin liikkein puhdistustehon parantamiseksi.
5. Sammuta laite, kun huuhtelu on valmis, ja kuivaa korva tarvittaessa.


ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- **Tehdastestaus:** Laitteessa saattaa olla jäämiä tislattua vedestä, jota on käytetty tuotteen laadunvalvontaan ja testaamiseen tehtaalla. Tämä on täysin normaalia.
- **Aloitussuositus:** Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa aloittaa hellävaraisesta tilasta. Voit siirtyä muihin toimintatiloihin myöhemmin tarpeen mukaan.
- **Vahan pehmentäminen:** Ennen huuhtelun aloittamista on suositeltavaa pehmentää kova korvavaha (esimerkiksi apteekista saatavilla korvatipoilla).

HUUHTELUKÄRJEN ASENNUS


Pehmeät korvahuuhtelukärjet ovat hygieenisiä, ja ne voidaan helposti irrottaa ja vaihtaa uusiin.

- **Asennusohje:** Aseta kertakäyttöinen huuhtelukärki suuttimen päähän ja kiinnitä se tiukasti kiertämällä myötäpäivään.

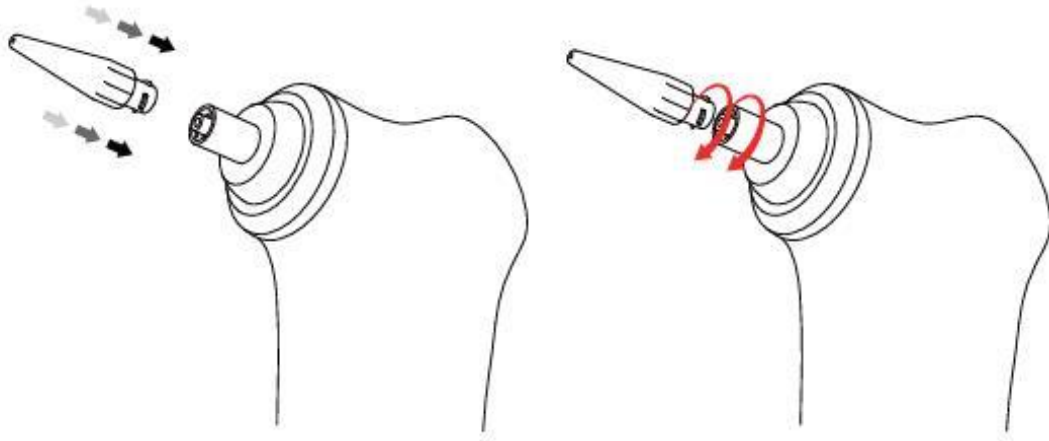


VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

- **Säiliön täyttö:** Irrota vesisäiliö, kaada sinne enintään 200 ml lämmintä vettä ja kierrä säiliö takaisin tiukasti kiinni.
- **Veden lämpötila:** Käytä aina kädenlämmintä vettä (suositus **37 °C ± 2 °C**). Veden on oltava riittävän lämmintä, sillä liian kylmä tai kuuma vesi voi aiheuttaa korvassa kipua tai voimakasta huimausta.
- **Kielletyt aineet:** Älä kaada säiliöön kemikaaleja tai kiinteitä aineita. Ne voivat tukkia suuttimen tai vaurioittaa laitteen sisäistä mekanismia.

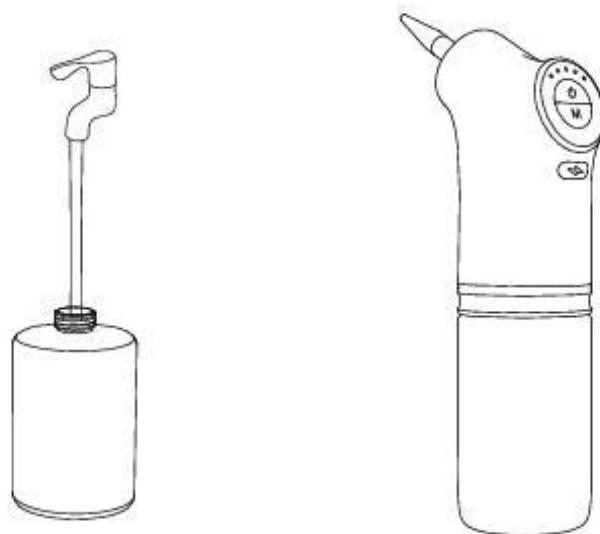


VALUMISASTIAN KÄYTTÖ KÄYTETYLLE VEDELLE

- **Ergonominen muotoilu:** Valumisastiassa on muotoiltu reuna, jossa on kapeampi ja laajempi pyöristetty osa.
- **Käyttö:** Aseta astian pyöristetty puoli tiiviisti korvalehden alapuolelle kaulaa vasten, jotta se kerää kaiken korvasta valuvan nesteen talteen huuhtelun aikana.

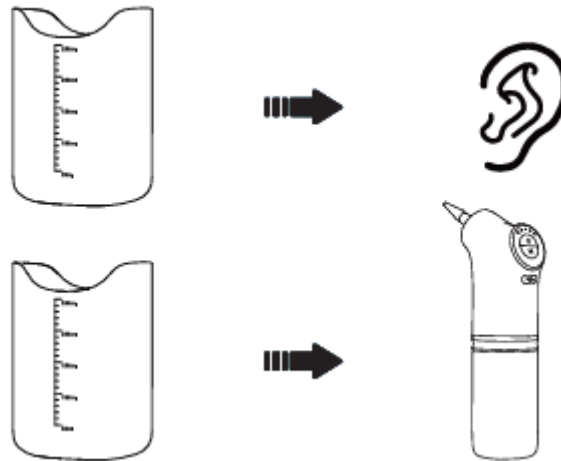

LATAUSOHJEET

- **Ennen käyttöä:** Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Sammuta laite aina ennen lataamisen aloittamista.
- **Turvallisuus:** Varmista, että sekä laite että kätesi ovat täysin kuivat, kun kytket pakkaukseen kuuluvan **USB-C-kaapelin** laitteeseen ja liität sen DC 5 V -latausporttiin.
- **Käyttökielto ladattaessa:** Älä käytä laitetta silloin, kun se on kytkettynä laturiin.

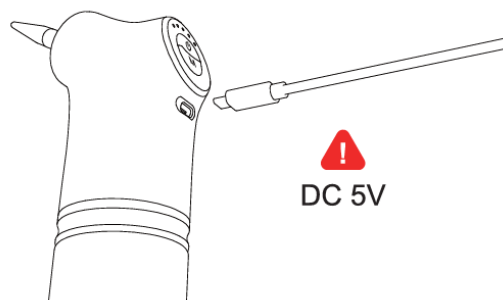

Latauslämpötilat

- **Suositus:** Lataa laite huoneenlämmössä, mieluiten **15–35 °C** lämpötilassa.
- **Alhaiset lämpötilat:** Akun toiminta-aika voi lyhentyä, jos laitetta ladataan alle 15 °C lämpötilassa.
- **Latauksen estyminen:** Jos ympäristön lämpötila on liian alhainen (alle 5 °C), akun lataaminen ei välttämättä ole mahdollista.

TEKNISET TIEDOT

- **Akun kapasiteetti:** 2 000 mAh
- **Teho:** 1,3 W
- **Virtalähde:** USB-C (5 V / 1 A)
- **Latausaika:** noin 3 tuntia
- **Toiminta-aika:** noin 7 tuntia
- **Vesisäiliön tilavuus:** 200 ml

HUOLTO JA VIANETSINTÄ

Huolto jokaisen käyttökerran jälkeen

- **Tyhjennys:** Sammuta laite, irrota vesisäiliö ja kaada kaikki jäljelle jäänyt vesi pois.
- **Kuivaus:** Käynnistä laite hetkeksi tyhjänä, jotta viimeisetkin vesipisarot poistuvat sisäisestä suuttimesta.
- **Hygienia:** Irrota käytetty korvahuuhtelukärki ja hävitä se (kärjet ovat kertakäyttöisiä).
- **Puhdistus:** Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla puuvillaliinalla tai pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineliuoksia, hankaavia aineita tai syövyttäviä nesteitä.

Vianetsintä

- **Laite ei käynnisty:** Akku saattaa olla tyhjä. Kytke laite laturiin ja lataa se täyteen.
- **LED-merkkivalot eivät syty latauksen aikana:** Tarkista, onko latauskaapeli ja virtalähde kytketty oikein laitteeseen ja pistorasiaan. Varmista myös, että käytössä on toimiva DC 5 V -virtalähde.
- **Vedenpaine on liian alhainen:**
 - Huuhtelukärki saattaa olla tukossa tai vaurioitunut. Vaihda tilalle uusi ja puhdas kärki.
 - Valittuna on liian mieto teho. Vaihda toimintatilaa voimakkaammaksi (esim. tehokkaaseen tilaan) tarpeen mukaan.

